

Beetle H-1

 **Bluetooth**
Bluetooth Headset



FR

Manuel

Félicitations et merci d'avoir acheté le Beetle H-1, l'écouteur sans fil Bluetooth™ pour les utilisateurs d'aides auditives et pour téléphones cellulaires, moderne et fonctionnel. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre écouteur !

Le Kit : Beetle H-1

Votre kit contient les items suivants:

Un NoiZfree™ Beetle H-1
Un cordon USB
Un manuel


Accessoires Optionnels
Chargeur (à votre spécialiste)

Introduction

Le kit oreillette "Bluetooth" NoiZfree **BEETLE H-1** pour les utilisateurs d'aides auditives, vous permet de recevoir et de passer des appels en toute liberté, lors de vos déplacements ou au bureau.

Le kit **BEETLE H-1** peut être connecté à un téléphone compatible prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le kit oreillette. Lisez également le manuel d'utilisation de votre téléphone, qui contient des informations importantes relatives à la sécurité et à la maintenance. Gardez le kit oreillette hors de portée des enfants.

Parties principales

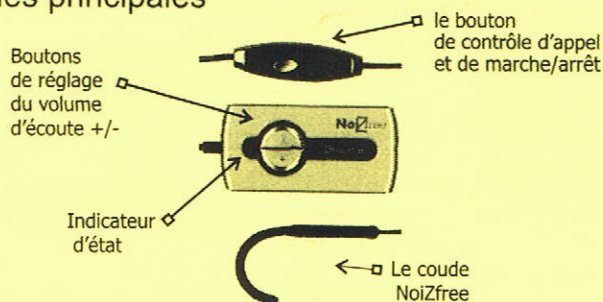

Pour les utilisateurs d'aides auditives

Placer le coude NoiZfree délicatement à côté de l'aide auditive

Placer l'interrupteur de l'aide auditive sur la position 'T'

Votre spécialiste peut vous aider



Charger la batterie

L'appareil dispose d'une batterie rechargeable interne inamovible. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil car vous pourriez endommager ce dernier.

1. Branchez le cordon USB à votre ordinateur.
2. Branchez le cordon USB au kit **BEETLE H-1**. Lorsque le voyant lumineux est rouge, cela indique que le chargement est en cours. Le chargement complet de la batterie peut nécessiter 2-4 heures.

